

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. A91100-M41-C318. Printed in Germany 9060-260201/0722/0/DEW

Dentsply Sirona

Deutschland / Österreich
SIRONA Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Deutschland
contact@dentsplysirona.com

Schweiz
Dentsply Sirona AG
Täfernweg 1, 5405 Baden-Dättwil, Schweiz
info.ch@dentsplysirona.com

Besuchen Sie uns auf: [dentsplysirona.com](https://www.dentsplysirona.com), [facebook.com/dentsplysirona](https://www.facebook.com/dentsplysirona), [dentsplysirona.de](https://www.instagram.com/dentsplysirona)

© Dentsply Sirona Inc 2022, Alle Rechte vorbehalten.

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™



THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™



Mehr Hygiene pro Sekunde

Dentosept Clean – Unser schnellstes Dentosept

dentsplysirona.com



Sauber ist gesund

Saubereres Wasser ist ebenso essenziell für die äußere wie für die innere Anwendung. Darin ähnelt eine Behandlungseinheit dem Menschen. Der Hygiene kommt hier daher eine besondere Bedeutung zu. Dentsply Sirona hat die Behandlungseinheiten in den vergangenen Jahrzehnten dementsprechend umfangreich weiterentwickelt – nicht nur in funktionaler und ergonomischer Hinsicht sowie im Design, sondern auch bei der Hygieneausstattung. Eine moderne Behandlungseinheit entlastet das Praxisteam durch intelligente, automatisierte Spül- und Sanierprogramme für die Wasserwege und Saugschläuche. Das spart viel Zeit und Arbeit. In puncto Hygiene ist Dentsply Sirona weltweit einer der Vorreiter und setzt Maßstäbe.

Bei der Infektionsprävention spielen die wasserführenden Wege eine besondere Rolle, denn Wasser ist ein hocheffizientes Transport- und Verbreitungsmedium für Keime. Neben der Wasserqualität des Stadtwassers und der korrekten Installation der wasserführenden Systeme sollte Wert auf die Verwendung eines Wasserdesinfektionsmittels gelegt werden, das zum einen eine hohe Wirksamkeit aufweist, zum anderen perfekt auf die Materialien der Wasserwege abgestimmt und somit schonend zur Behandlungseinheit ist.

Konstante Wasserentkeimung

Eine in die Behandlungseinheit integrierte Desinfektionsanlage trägt wesentlich zur Erhaltung einer hohen Wasserqualität bei. Sie mischt dem Betriebswasser kontinuierlich das Entkeimungsmittel Dentosept bei, das bei konsequenter Anwendung zuverlässig die Vermehrung von Keimen in den Wasserwegen der Behandlungseinheit hemmt.

Intensiventkeimung (Sanierung)

Die integrierte Desinfektionsanlage verfügt zusätzlich über eine Funktion zur Sanierung. Dabei werden alle Wasserwege auf Knopfdruck automatisch mit unverdünntem Dentosept geflutet. Diese intensive Entkeimung (Sanierung) an den Wänden der Wasserwege wirkt der Bildung eines Biofilms effektiv entgegen.

Verbleibt das Dentosept für mindestens 24 Stunden (z. B. über das Wochenende) in den Wasserwegen, bekämpft es effektiv eine mögliche Keimbelastung und bietet somit einen optimalen Schutz. Dentsply Sirona empfiehlt die Sanierung der Wasserwege einmal pro Monat sowie nach längeren Standzeiten der Behandlungseinheit.



Mehr Hygiene pro Sekunde mit Dentosept Clean

Mit den steigenden Hygieneanforderungen steigen auch die Anforderungen an das Desinfektionsmittel für die Wasserwege in der Behandlungseinheit. Das neue Dentosept Clean hat einen schnelleren Wirkeintritt* und eine verbesserte Wirksamkeit**. Durch seine neue Wirkkombination auf Basis von Wasserstoffperoxid sorgt es damit innerhalb kürzester Zeit für eine Inaktivierung der Keime in den Wasserwegen ihrer Behandlungseinheit – die Dank verbesserter Depotwirkung auch nachhaltig wirkt. Dabei ist Dentosept Clean selbstverständlich genauso sicher und materialschonend wie sein Vorgänger Dentosept S.

* Vergleich der mikrobiologischen Wirkkinetik der Desinfektionsmittel Dentosept S und Dentosept Clean, HygCen Germany GmbH, 2021.
** Vergleich der mikrobiologischen Wirkung der Desinfektionsmittel Dentosept S und Dentosept Clean auf Biofilmbeläge in Dentalschläuchen, IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, 2022